


保証書付 取扱説明書

集音器

型番：MHA-003Z 品番：03-0376

このたびは、AudioComm® 集音器を
お買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

本機の機能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。

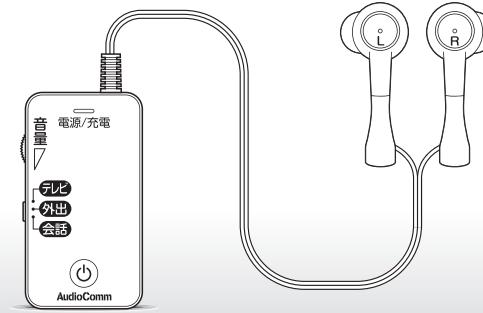

保証書

持込修理 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
 3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	集音器			★お買い上げ日： 年 月 日
型 番	MHA-003Z	品 番	03-0376	保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	ふりがな ★お名前 様			
	★ご住所 〒 一			
	電話 ()			

修理メモ

★住所 店名 電話

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及び
それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

○ OHM 株式会社 オーム電機	
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-4-1	
https://www.ohm-electric.co.jp	
製品に関するお問い合わせは、お客様相談室へ	
●電話無料	●携帯・IP・公衆電話からも
0120-963-006 048-992-2735	
電話 受付	平日 9:00～17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は、 修理ご相談センターへ	
048-992-3970 平日 9:00～17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます	

免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
 - 本製品のために費やした時間及び経費
 - 本製品を運用した結果もたらされた損害
 - 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
 - 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

安全上のご注意

電気製品は正しく取り扱うことによって、安全にお使いいただけます。間違った使いかたは火災や感電による人身事故につながることがあります。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

危険

- 充電式電池（リチウムポリマー電池）が液もれしたときは、素手で触らない
・本機には充電式電池（リチウムポリマー電池）が内蔵されています。万一液もれしているのを見つけたら、素手で触らず、弊社修理ご相談センターにご連絡ください。
・万一、液が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。失明の原因となるおそれがあります。
・液がからだや衣服についたときも、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。

警告

以下を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定

- 万ー、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに電源を切る
 - ・そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。
 - ・煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
 - 万ー、内部に水や異物などが入った場合は、使用を中止する
 - ・そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
 - ・販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
 - 本製品を家庭用電源で使う場合は必ず付属のACアダプターを使う。また、付属のACアダプターは絶対に他の製品には使用しない
 - ・付属のACアダプターは本製品専用です。
 - ・製品の破損、もしくは火傷・発煙・火災の原因となる場合があります。
 - ACアダプターを使用するときは、すぐに手が届く位置にある家庭用コンセントに接続し、異常が発生した場合は速やかにACアダプターをコンセントから抜く
 - ・手が届きにくい場所にあると、異常があったときに対応が遅れるおそれがあります。
 - ・本機の電源を切っただけでは、完全に電力を遮断できません。
 - 自動車、バイク、自転車などの運転の中は本機を使用しない。それ以外でも、周囲の音が聴こえないと危険な場所(踏切や駅のホーム、車の通る場所、工事現場など)では本機を使わない
 - ・運転中に使用すると、交通事故の原因になります。
 - ・歩行中でも周囲の状況に十分に注意し、他者の迷惑にならないようにご注意ください。
 - 付属の充電コード以外では充電しない
 - ・火災や感電、機器の故障の原因となります。
 - 屋外で使用中に雷が鳴り始めたら、すぐに使用を中止する・落雷による感電や故障の原因となります。
 - 台所や浴室やシャワー室など、湿度の高いところや水はある場所では使用したり、保管したりしない・火災や感電の危険があります。
 - 自動車の中や直射日光の当たる場所、火のそばなどでは使用しない。また絶対に放置しない
 - ・高温になると、危険を防止するためリチウムポリマー電池が充電できなくなったり、保護回路が壊れて異常な電流や電圧で充電され、発熱、破裂、発火の原因になります。
 - 本機や充電コードの上に重いものをのせたり、コードの上に本機をのせない
 - ・コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。
 - 充電コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない
 - ・コードが破損して火災・感電の原因となります。
 - 火の中に入れない。加熱しない
 - ・本機にはリチウムポリマー電池が内蔵されており、誤って火中に入れると、発熱、破裂、発火の原因になります。
 - 雷が鳴りだしたら、本機及びACアダプターに触れない・感電の原因になります。
 - 長期間使わないときは、ACアダプターを取り外しておく・火災の原因となることがあります。
 - ACアダプターとコンセントの接続部を定期的に掃除する・ACアダプターとコンセントの間にほこりがたまると自然発火(トランギング現象)を起こすことが知られています。年に数回、定期的に接続部のほこりを取り除いてください。梅雨期前が効果的です。


注意

以下を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定されますので十分ご注意ください。

- | | |
|--|--|
| ●ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所、振動の多いところに置かない
・落下による故障やけがの原因となることがあります。 | ●本機を分解、修理、改造しない
・火災・感電の原因となります。 |
| ●落としたり、重いものを載せたりしない。また、本機に強いショックを与えるたり、圧力をかけたりしない
・故障や破損の原因になることがあります。 | ●音量を上げすぎない
・耳を刺激するような大きな音量で長時間使用すると、聴覚に悪い影響を及ぼすおそれがあります。 |
| ●充電コードのプラグを抜くときは、コードを引っ張らない
・コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
・必ずプラグ部を持って抜いてください。 | ●「ビーピー」というノイズ音がするときは音量を下げる
・聴覚に悪い影響を及ぼすおそれがあります。音量を下げてお使いください。 |
| ●使用中に気分が悪くなったときは、ただちに使用を中止する
・必要に応じて医師に相談してください。 | ●電磁波を発生させる機器（携帯電話、テレビ、パソコン、モニターなど）に近づけない
・電磁波によりお互いの機器が干渉し、ノイズの原因となります。 |
| ●油煙や湯気のあたるところに置かない
・火災・感電の原因となることがあります | ●本機をシンナーやベンジンなどで拭かない
・変形・変色の原因となります。 |
| ●日本国外では使用しない
・本機は日本国内専用です。 | ●本機をポケットやカバンの中に入れたままにしない
・力が加わるなどして、変形したり、破損、故障の原因となることがあります。 |
| ●充電コードを熱器具に近づけない
・コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります | ●耳や頭部の治療を受けている人や治療を受けたことがある人は、使用前に専門医に相談する |

各部の名称

- ①電源／充電ランプ
- ②音量ダイヤル
- ③モード切換スイッチ
- ④電源ボタン
- ⑤充電用microUSBポート
- ⑥左イヤホン
- ⑦右イヤホン
- ⑧集音マイク(モノラル)

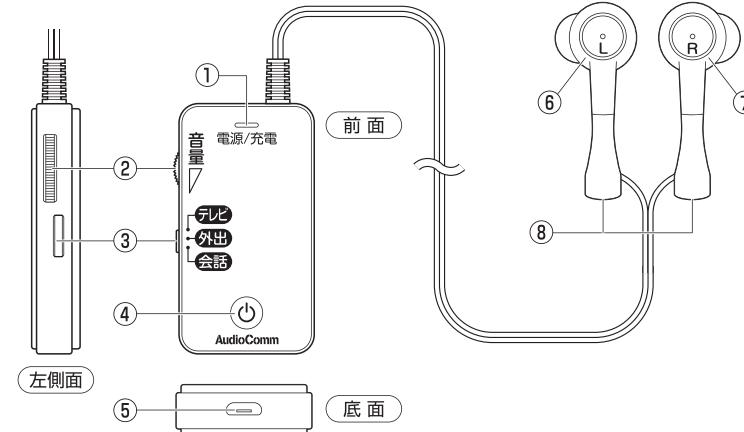


充電のしかた

充電が始まると電源／充電ランプが赤く点灯し、完了すると消灯します。


【パソコンとつないで充電する場合】

充電コード(付属)のmicroUSB端子を本機の充電用microUSBポートに接続し、もう一方のUSB端子をパソコンのUSBポートに接続します。

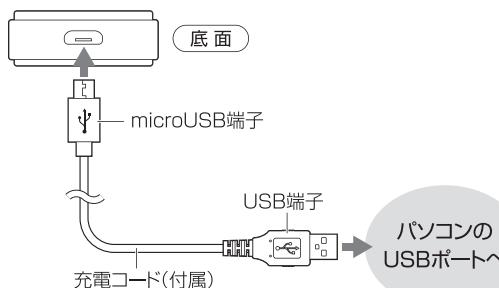

【家庭用コンセントで充電する場合】

充電コード(付属)のmicroUSB端子を本機の充電用microUSBポートに接続し、もう一方のUSB端子をACアダプター(付属)のUSBポートに接続します。その後、ACアダプターを家庭用コンセントに接続します。

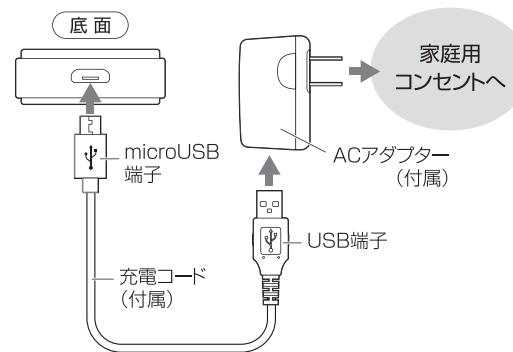

充電式電池について

●充電式電池(リチウムポリマー電池：本製品に内蔵)には寿命があり、正常に使用した場合でも経年により劣化します。また、電池の交換はできません。

●充電式電池はリサイクルできます。廃棄については各自治体にご相談ください。

使いかた

1 電源ボタンを押して電源を入れます。

●電源／充電ランプが青く点灯します。

2 モード切換スイッチでモードを選びます。

●聴きとりやすいモードを選んでください。

テレビモード：テレビの音や音楽を聴くのに適しています。

外出モード：外出時の使用に適しています。

会話モード：会話や会議での使用に適しています。


3 音量ダイヤルを回して、適切な音量に調節します。

●音量の上げすぎにご注意ください。

●集音マイクを塞がないようにしてください。

●集音マイクは左右のイヤホンにありますが、

音声はステレオではなく、モノラルになります。

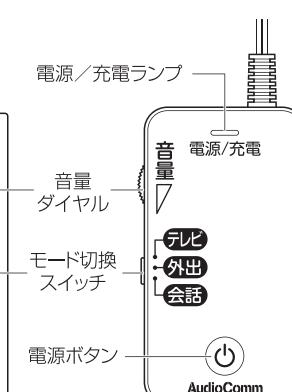

4 終了するときは、電源ボタンを押して電源を切ります。

●電源／充電ランプが消灯します。


●静電気に関するご注意

空気が乾燥する時期にイヤホンを使用すると、耳にびりびりと痛みを感じることがあります。これはイヤホンの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身に着けていただくことでより影響が軽減されます。

イヤホンコードの収納と保護カバーについて

●イヤホンコードの収納について


使わないときは付属の結束クリップに巻きつけておくと便利です。

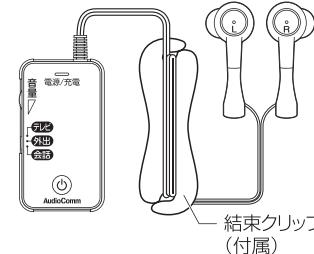

※イヤホンコードは本機に巻きつけないでください。また、イヤホンを強く引っ張らないでください。断線のおそれがあります。

●保護カバーについて

本機に付属の保護カバーを取り付けると、衝撃などから本機を保護することができます。また、保護カバーはポケットなどへのクリップも兼用しています。

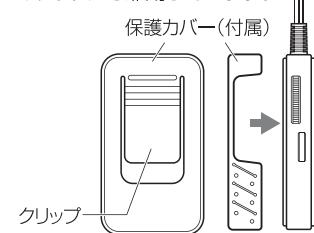

イヤーチップの交換方法

本製品には3種類(S, M, L)のイヤーチップが付属しています。フィットするサイズを選んでご使用ください(工場出荷時はMサイズが装着されています)。



故障かなと思ったら

電源が入らない

●充電池の残量が少なくなっています。

音が出ない／音が小さい

●音量が最小になっています。

●電源は入っていますか。

●集音マイクが服などでひさがっていませんか。

●音源との間が離れていませんか。

雑音が多い

●近くで携帯電話を使用していませんか(携帯電話から離して使用してください)。

●蛍光灯などが近くにありませんか(蛍光灯などから離して使用してください)。

「ピーピー」というノイズ音がする

以下の方法をお試しください。

●音量を下げる ●イヤホンを正しく装着し直す ●イヤーチップのサイズを変える

※必ず電源を切ってから行ってください。



シンナー、ベンジン、
アルコールは
使用しない

お手入れのしかた

●本機の表面が汚れたら、柔らかい布でから拭いてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後にから拭きをしてください。

●シンナー、ベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。

主な仕様

電 源	DC5V (USB給電 : microUSB入力端子)
内 蔵 電 池	充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)
充 電 時 間	約3時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用時間	約13時間(フル充電時、音量中位)
外 形 尺 法	本体 : 幅31×高さ56×奥行12mm 保護カバー(装着時) : 幅34×高さ58×奥行13mm
質 量	約31g(イヤホン含む)
付 属 品	充電コード、ACアダプター、イヤーチップ(S / M / L各2個、Mは本体に装着済み)、保護カバー(本体に装着済み)、結束クリップ、収納ポーチ、保証書付取扱説明書

※本製品は医療機器認定を取得した補聴器ではありません。

※仕様及び外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※連続使用時間は、音量中程度の目安です。使用環境により異なります。

※本書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついており、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは 修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は 保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。