



保証書付 取扱説明書

AudioComm 遠耳くんクリップをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくため、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保存してください。

安全にお使いいただくために

電気製品は正しく取り扱うことによって、安全にお使いいただけます。間違った使い方は火災や感電による人身事故につながることがあります。ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

⚠

警告

「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

●

ボタン電池は、乳幼児の手の届かないところに置く。電池を飲み込んだ場合はすぐ医師に相談してください。

●

車、バイク、自転車の運転中には絶対に使用しない。運転中に使用すると交通事故などの原因となります。

●

踏切や、駅のホーム、車道、工事現場など危険な場所では絶対に使用しない。周囲の音が聴こえず、不慮の事故などの原因となります。

⚠

注意

「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気のあたる所には置かない。故障の原因となります。

●

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる所、暖房器具のそばなど、異常に高温になる所に置かない。故障及び火災の原因となります。

●

指定以外の電池は使用しない。新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。電池の破裂、液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となります。

●

電池は、プラス(+)とマイナス(-)の表示通りに入れる。電池の破裂、液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となります。

●

本製品を長期間ご使用にならないときは、電池を取り出してください。電池の破裂、液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となります。

本体のお手入れの仕方

やわらかな布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤や石けん水に浸した布を固く絞って拭き取り、やわらかな乾いた布で仕上げてください。なお、シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたりしないでください。変色・変形、または破損の原因になります。

故障かな?と思ったら

下表を参考に点検してください。

現 象	点検方法
音が出ない	・音量が最小になっていないか確認。 ・電池の残量を確認(残量がない場合は電池を交換)。
雑音が入る	・携帯電話、テレビ、蛍光灯の近くで使用していないことを確認。

主な仕様

最大出力音圧レベル(本体): 120±3dB
周波数特性: 本体/300～5,000Hz、マイク/50～10,000Hz
電 源: DC3V ボタン電池LR44×2個(別売)
電池寿命: アルカリボタン電池 / 連続約10時間 (音量により多少異なる場合があります。)
イヤホン端子: φ3.5mmステレオミニジャック
集音マイク: 無指向性
使用可能距離: 3～5m
外形寸法: 幅45×高さ50×奥行21mm (クリップ部を含む、イヤホンは除く。)
質 量: 約16g(電池含まず)
付 属 品: 専用ステレオイヤホン(インピーダンス 120Ω / コード長 約60cm)


※本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。※改良などのため、仕様および外観は予告なく変更する場合があります。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
(ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ)本書のご提示がない場合
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
(ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ)一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。


※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

各部の名称

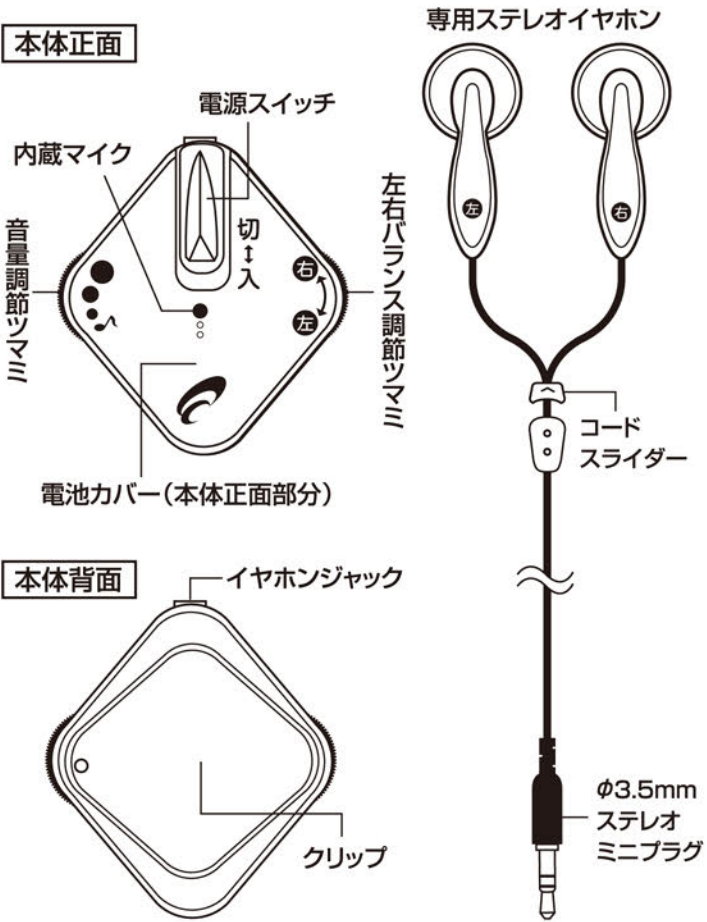


電池の入れ方

- 本体正面の電池カバーをスライドさせた後、持ち上げて外します(下図参照)。
- 電池ボックスにボタン電池LR44(別売)を2個入れます。電池はプラス(+)の刻印がある面を表にして、極性通りに正しく入れてください。
- 電池ボックスカバーを①と逆の手順で閉めます。

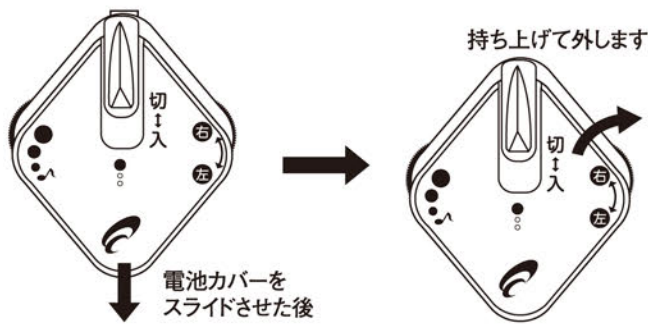

▼電池カバーを外した状態

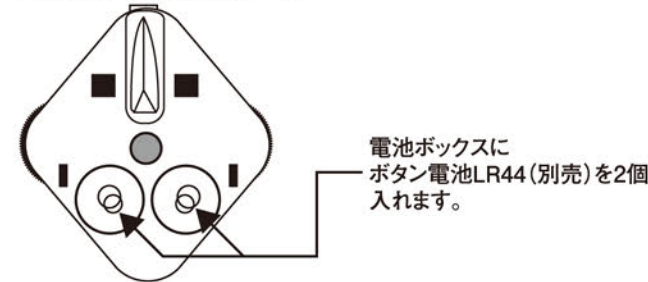

集音器の使い方

- 音量を音量調節ツマミを回して最小に絞ります。
- 専用ステレオイヤホンのプラグを本体イヤホンジャックにしっかり差し込みます。
- 専用ステレオイヤホンを耳に装着します。イヤホン本体に左右の表示がありますので、表示に合わせて左右の耳に装着してください。また、コード途中にあるコードスライダーを上下にスライドさせてコードが胸元でフィットするように調節してください。
- 電源スイッチを「入」にします。
- 音量調節ツマミをゆっくりと回して音量を調節します。音量調節の際は音量を上げすぎないでください。耳を刺激するような音量で長時間使用すると聴力が大きく損なわれる原因となります
- 周囲の音が聴こえやすいように左右バランス調節ツマミを回して調節します。
- ご使用を終える時は、電源スイッチを「切」にして、専用ステレオイヤホンを耳から外します。

※ご使用後は電源スイッチの切り忘れにご注意ください。電池が早く消耗する原因となります。
※集音マイクは本体に内蔵されていますので、本体をポケットの中に入れますと聴き取りづらくなります。ご使用の際は、本体のクリップを利用してシャツのボタンとボタンの間にはさむ、ポケットにはさむなど、本体を外に出してご使用ください。
※本体マイク付近での音源には、音量を絞るなど十分にご注意ください。
※専用ステレオイヤホンのプラグの抜き差しの際は、プラグ部分をもって行ってください。コード部分をもって抜き差ししますと断線するおそれがありますのでおやめください。

保証書

持込修理

商品名	遠耳くんクリップ	★お買い上げ日：年 月 日
型番(品番)	MHA-271N(03-2715)	保証期間:本体1年間 (お買い上げの日から)
お客様	ふりがな ★お名前	様
	★ご住所 〒	—
	電話	()
修理メモ		
販売店	★住所 店名 電話	
	(印)	

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

OHM

株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は

修理ご相談センターへ

電話受付

048-992-3970 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは

お客様相談室へ

●通話料無料

0120-963-006 048-992-2735

●携帯電話・IP・公衆電話からは

平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます