

## ⚠ 注意

- 使用後は電源スイッチを切ってください。電池が早く消耗する原因となります。
- 集音器を長い間ご使用にならない時は、乾電池を本体から取り出してください。長い間ご使用にならないで、乾電池を入れたままにしておくと、乾電池の液漏れによる故障の原因になります。
- 本体が汚れた時は柔らかい布で空ぶきしてください。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を少し含ませてお拭きください。

## 主な仕様

最大出力音圧レベル：96±3dB  
(EN-50332-1適合)

インピーダンス：32Ω

電 源：DC1.5V 単4形乾電池1本(別売)

重 量：30g(乾電池含まず)

寸 法：42(幅)×69(高)×20(奥行) mm

電池寿命：アルカリ乾電池/連続約100時間  
(音量により多少異なる場合があります)

付 属 品：ネックストラップ、携帯ポーチ、  
イヤークリップ、マイク付両耳タイプイヤホン(約1.2m)

端 子：3.5mm3極ジャック

マイク：無指向性

使用可能距離：3~5m

※仕様および外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

## 故障かなと思ったら

症 状	チェック項目
音が出ない	●乾電池の残量を確認してください。 ●電源スイッチが「OFF」になっていませんか。または音量が最小になっていませんか。
雑音が入る	●本機は周辺の雑音の影響を受けることがありますので、電波利用機器や電気ノイズを発生する機器から離して使用してください。

## 保証書とアフターサービス

### <保証書について>

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項を確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### <アフターサービスについて>

#### ●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理係にご相談ください。

#### ●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

#### ●保証期間が過ぎた場合は


修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理係にご相談ください。

## 取扱説明書

### 集音器

# 遠耳君 Super

型番：MHA-600Y

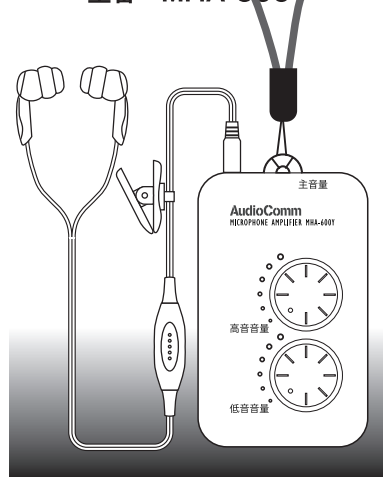

このたびは、AudioComm®集音器 遠耳君 Super をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。“この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください” また、お読みになった後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保存してください。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
http://www.ohm-electric.co.jp

修理ご相談センター 048-992-3970  
お客様相談室 Tel.048-992-2735  
受付時間：月~金 9:00~17:30  
土 9:00~17:00  
\*日・祝は休ませていただきます

AudioComm®

## 安全にお使いいただくために

電気製品は正しく取り扱うことによって、安全にお使いいただけます。間違った使い方は火災や感電による人身事故につながる可能性があります。ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

### ⚠ 警告

乾電池は充電しないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となります。

歩行中にご使用の場合は、特に路切や交差点など周囲の交通に十分注意してください。交通事故などの原因となります。

屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、使用を中止してください。雷撃を受ける原因となります。

乾電池を入れる時は、極性表示（プラス+とマイナス-の向き）に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂・液漏れにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

指定以外の乾電池は使用しないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災やけが、周囲を汚損する原因となることがあります。

### ⚠ 注意


調理台など油煙が当たるような場所に置かないでください。故障の原因となることがあります。

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。本体や部品に悪い影響を与え、故障の原因となることがあります。

乾電池を出し入れる時は、電源を必ず OFF にしてください。


電源を入れる前には、音量（ボリューム）を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。

## 各部の名称

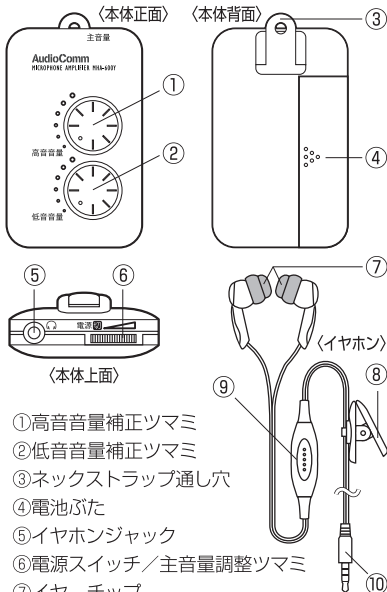


- ①高音音量補正ツマミ
- ②低音音量補正ツマミ
- ③ネックストラップ通し穴
- ④電池ふた
- ⑤イヤホンジャック
- ⑥電源スイッチ／主音量調整ツマミ
- ⑦イヤーチップ
- ⑧クリップ
- ⑨マイク
- ⑩プラグ

## イヤーチップの交換方法

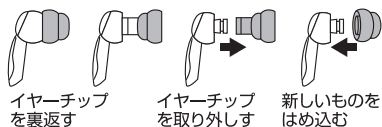

※イヤーチップは3種類（S・M・L）あります。一番フィットするものをご使用ください。  
※工場出荷時はMサイズを装着しております。

## 電池の入れ方（電池の交換方法）

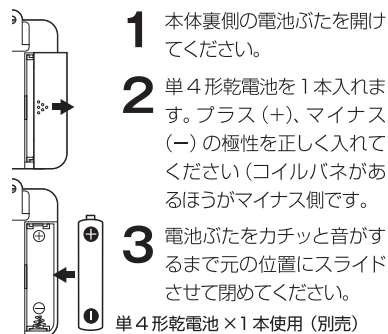

## 集音器の使い方

- 1 ネックストラップを、ネックストラップ通し穴に図のように取り付けます。
- 2 ネックストラップを首から下げ、クリップでイヤホンのコードを服などに留めます。
- 3 イヤホンのプラグをイヤホンジャックに差し込みます。
- 4 電源スイッチ／主音量調整ツマミをゆっくり回すとカチッと音がして電源が入ります。そのままツマミを回すと音量が大きくなります。
- 5 周囲の音が聞こえやすいように、高音音量補正ツマミと低音音量補正ツマミで調整します。