

# ご使用方法

ご使用方法をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください。また、お読みになった後も、ご使用中にいつでも見られるよう大切に保管してください。

## 各部の名称



〈本体正面〉



〈本体背面〉



〈本体側面〉

- ① 電源スイッチ(Ⓛ/切)
- ② 音量調整つまみ (大) (小)
- ③ バランス補正つまみ (左(L)/右(R))
- ④ マイク
- ⑤ 電池カバー(表面部全体)
- ⑥ クリップ
- ⑦ イヤホン (左(L)/右(R))
- ⑧ コードスライダー
- ⑨  $\phi$ 3.5mm ステレオミニプラグ
- ⑩ イヤホンジャック

## 電池の入れ方(交換方法)



- ① 本体表面の電池カバーをスライドさせて開きます。
- ② LR44 ボタン電池を2個入れます。
- ③ 元の位置に電池カバーをスライドさせてカチッと音がするまで閉めます。

プラス(+)の刻印がある面を表にしてください。



LR44 ボタン電池 ×2 個使用(別売)

## 故障かなと思ったら

症状	チェック項目
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 乾電池の残量を確認してください。</li><li>● 電源スイッチが「切」になっていませんか。または音量が最小になっていませんか。</li></ul>
雑音が入る	<ul style="list-style-type: none"><li>● 本機は周辺の雑音の影響を受けることがありますので、電波利用機器や電気ノイズを発生する機器から離して使用してください。</li></ul>

## 集音器の使い方

- ① 音量調整つまみが最小(小)になっているか確認します。
- ② インナーホンを耳に装着して電源スイッチを「Ⓛ」にします。
- ③ 音量調整つまみをゆっくりと回して音量を調整します。
- ④ 周囲の音が聞こえやすいように、バランス補正つまみで調整します。

## ⚠ 注意

- 使用後は電源スイッチを切ってください。電池が早く消耗する原因となります。
- 集音器を長い間ご使用にならないときは、ボタン電池を本体から取り出してください。長い間ご使用にならない場合、ボタン電池の液漏れ等による故障の原因となります。
- 集音マイクは本体に内蔵されています。(モノラル)
- ポケットの中等では聴き取りずらいことがあります。また、マイク付近での音源には、音量をしぼる等十分にご注意ください。