

型番／品番	HBK-T101-W／08-0077
型番／品番	HBK-T101-A／08-0078

日々の健康管理に

デジタル体重計



■本紙に記載しているイラストはイメージです。

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

輸入事業者：

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センター へ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00～17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

目次	ページ
安全上のご注意	1～2
製品についてのお願い	3
測定のためのチェックポイント	3
各部名称	4
ご使用になる前に	5
測定方法	6
製品仕様	6
体重計精度保証範囲	7
お手入れ方法	7
故障かな？と思ったら	7
持込修理 無料修理規定	8
保証書	背表紙

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
平日 9:00～17:00	
電話受付	※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

安全上のご注意

お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために、お守りいただきたいことを、次のように説明しています。本説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

□警告・注意について



警告

この内容を守らないと人が死亡または重傷を負う危険性があります。



注意

この内容を守らないと傷害を負う危険または物的損害が発生するおそれがあります。

□図記号の例



してはいけない「禁止」内容を示しています。



「必ず守っていただく」内容を示しています。



警告



禁止

- ・ **タイル面やぬれた床など、すべりやすい所では使用しない。**

転倒したり、すべって大けがをする可能性があります。
また本機内部に水が侵入し故障の原因になります。

- ・ **本製品の端にのったり、飛びのったり、飛び跳ねたり、投げたりしない。**

転倒したり、すべって大けがをする可能性があります。また強化ガラスを使用していますが、ガラスが破損しけがをする可能性があります。



水ぬれ禁止

- ・ **ぬれた体でのらない。**

転倒したり、すべって大けがをする可能性があります。

- ・ **水につけたり、水をかけたりしない。**

本機内部に水が侵入し故障の原因になります。



必ず守る

- ・ **測定結果を決して自己判断しないでください。**

必ず医師または専門家の指導を受けてください。

注意



分解禁止

- ・ 分解・修理・改造は絶対にしないでください。



水ぬれ禁止

- ・ 本体に水などの液体をかけないでください。

- ・ 電池を火中に入れたり、加熱、水没しないでください。

- ・ 新しい電池と使用済みの電池、種類の違う電池を同時に使用しないでください。

- ・ 業務用（病院や健康診断など）では絶対に使用しないでください。

- ・ 品物の取引または証明には使用しないでください。



禁止

- ・ 測定するときは素足でのってください。

- ・ 体を安定させることが難しい方は、介護者の援助を受けるか手すりなどをご利用ください。

※体に何かに触れている状態での測定結果は参考値としてください。

- ・ 本製品の隙間などに指や異物を入れないでください。

- ・ 本製品を乳幼児に触らせないでください。

- ・ 電池は極性 $\oplus$ $\ominus$ を正しくセットしてください。



必ず守る

- ・ 電池を廃棄する際は、お住まいの地方自治体の指示に従ってください。

製品についてのお願い

- 本製品は家庭用です。業務用、品物の売買取引やその他の目方を証明する場合などには使用できません。
- 本製品を落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 直射日光が当たる場所や極端な高温の場所で使用しないでください。また電子レンジなど電磁波を発生する機器の近くでは使用しないでください。
- 温度差の大きい場所を移動させた場合は、2時間以上その環境に放置した後にご使用ください。

保管上のご注意

- 次のような場所で保管しないでください。
湿気の多い場所・直射日光が当たる場所・極端に高温な場所
- 次のような状態で保管しないでください。
物をのせた状態・裏返しの状態・立てかけた状態・電池を入れたまま箱に収納した状態
- 長期間（40日以上）使用しない場合は、電池を取り外し保管してください。

測定のためのチェックポイント

正しい測定を行うために次の項目をチェックしてください。

設置場所

平らで硬い床面に設置してください。畳や絨毯などの柔らかい床面で使用しないでください。また脚部にゴミなどの異物が付着していないことを確認してください。

着衣

素足で、なるべく裸に近い状態が望ましいです。

姿勢


直立した状態で静かに本体にのり測定してください。座ったり、何かに触れたまま測定しないでください。また測定中はできる限り動かないでください。

測定時間


食後2時間以上経過していることがよいとされています。毎日同じ時間に測定することをお勧めします。

各部名称

● 各部名称 (表)

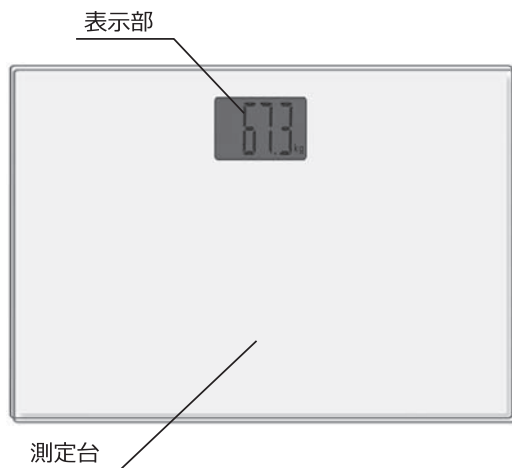

● 各部名称 (裏)

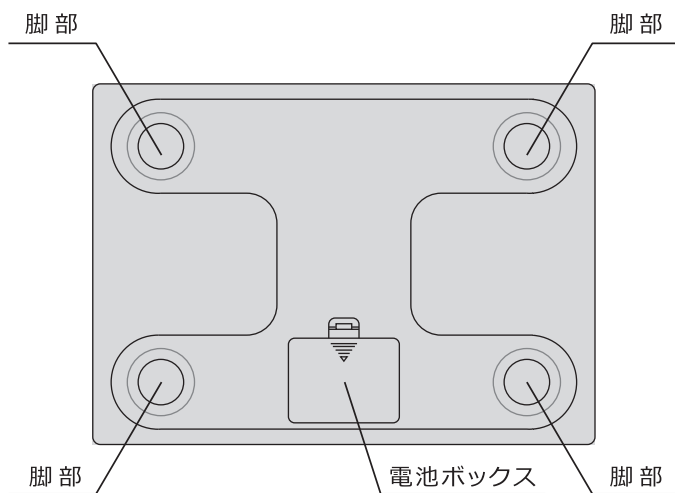


ご使用になる前に

● 乾電池の入れ方


使用電池：単4形乾電池 × 3本

※初めてご使用になる際は、単4形乾電池をセットして正常に動作することを確認してください。

- ① 下図ツメを矢印の方向に押しながら、電池蓋を持ち上げて外してください。

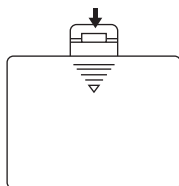

- ② 下図の通りに電池を1本ずつ挿入し、セットしてください。
このとき電池の極性に注意しながら、正しく入れてください。

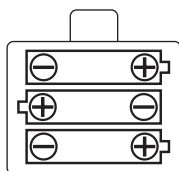

- ③ ①と逆の手順で電池蓋をセットしてください。

※付属の動作確認用電池は寿命が短くなっている場合があります。

● 乾電池の交換

電池が消耗すると「」が点滅します。

上記の手順で新しい電池と交換してください。

⚠ 警告 電池の取扱いについて

- 万一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の診察・治療を受けてください。
- 万一、電池の液が皮膚や衣服についたときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。
- 電池の極性(+) (-) を正しく入れてください。液漏れ、破裂、発熱などが発生し、ケガや故障の原因になります。
- 必ず指定の電池を使用し、新旧異種を混用しないでください。
- 長期間（40日以上）使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。液漏れ、破裂などが発生し、ケガの原因になります。
- 電池交換の際は、3本全てを新品の同一銘柄の電池と交換してください。
- 充電式電池は使用しないでください。
- 電池を火中に入れたり、加熱、充電しないでください。液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池を水などでぬらさないでください。発熱したり、端子にさびが発生するおそれがあります。
- 電池を廃棄する際はお住まいの地方自治体の指示に従ってください。

測定方法

- ①本製品を平らで硬い床面に設置し、本体の上に静かにのってください。
※のると自動で電源が入ります。動いたり、体が何かに触れないようにしてください。
- ②体重が確定すると、結果が3回点滅し、約10秒表示されます。
- ③結果表示から約10秒程で自動的に電源が切れます。
※測定値が最大計量をこえる場合は「Err」を表示します。
※ステップオン荷重は4kg以上です。4kg以下の荷重では電源が入りません。

製品仕様

製 品 名	デジタル体重計
型 番 / 品 番	HBK-T101-W / 08-0077 HBK-T101-A / 08-0078
最大計量(ひょう量)	150kg
最小表示(目量)	3～100kg:0.1kg 100～150kg:0.2kg
計 量 範 囲	3～150kg
ステップオン荷重	4kg以上
電 源	4.5V  単4形乾電池3本 (動作確認用乾電池3本付属)
電池寿命(約)	1年(新しい電池使用、1日1分間使用時)
外形寸法(約)	幅265×高さ24×奥行185mm
質 量 (約)	945g(電池含む)
付 属 品	保証書付取扱説明書 単4形乾電池×3本(動作確認用)

※パッケージおよび取扱説明書に記載されているイラストはイメージです。
実際の製品と異なる場合があります。

※商品改良のため、仕様及び外観は予告なしに変更することがあります。



体重計精度保証範囲

本製品は計量法に定められた技術基準で製造し、厳正な検査の上、出荷しております。
なお製品の精度保証範囲は次のとおりです。

周囲温度23.5±5℃、湿度50±20%

計量範囲	精度保証範囲
3kg をこえて75kgまで	±0.2kg
75kg をこえて100kgまで	±0.3kg
100kg をこえて150kgまで	±0.6kg

※本製品はご家庭で使用されるためにつくられたものです。品物の売買取引や、公に
その物の目方を証明する場合はご使用になれませんのでご注意ください。

お手入れ方法

やわらかいふきんを水にぬらし、よく絞ってから拭いてください。

※ベンジン・シンナー・磨き粉・たわし・スポンジのナイロン面は使用しないでください。

※40℃以上の湯は使用しないでください。

故障かな？と思ったら

「故障かな？」と思ったら、修理をご依頼される前に次のことをご確認ください。

症 状	対 処
測定台の上に一度 のっても表示部に 何も表示しない	●電池はセットされていますか？電池をセットしてください(P.5) ●電池が消耗していませんか？新しい電池と交換してください(P.5) ●電池の極性(⊕)(⊖)を正しくセットしていますか？電池の極性(⊕)(⊖)を正しくセットしてください(P.5) ●荷重は4kg 以上ですか？ステップオン荷重は4kg 以上です。4kg 以下の荷重では電源が入りません。
計量結果が正しく ない	●動いたり、体が何かに接触していませんか？(P.3)
Lo と表示される	●電池が消耗しています。新しい電池に交換してください(P.5)
Err と表示される	●最大計量(ひょう量)150kgを超えています(この場合測定できません)