


日々の健康管理に デジタル体重計

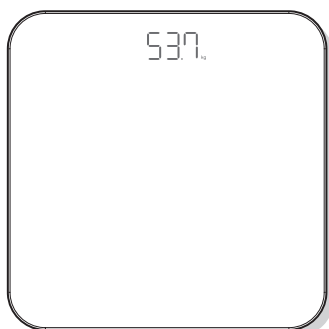

※本紙に記載しているイラストはイメージです。

この度は弊社製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。
お読みになられたあとも、いつでも見られ
よう大切に保管してください。

目次

	ページ
安全上のご注意	1～2
製品について	3
測定のためのチェックポイント	3
各部名称	4
ご使用になる前に	5
測定方法	6
製品仕様	6
計量精度	7
お手入れ方法	7
故障かな？と思ったら	7
持込修理 無料修理規定	8
保証書	背表紙

輸入事業者：

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

安全上のご注意

お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために、お守りいただきたいことを、次のように説明しています。本説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。

□ 警告・注意について



警告

この内容を守らないと人が死亡または重傷を負う危険性があります。



注意

この内容を守らないと傷害を負う危険または物的損害が発生するおそれがあります。

□ 図記号の例



してはいけない「禁止」内容を示しています。



「必ず守っていただく」内容を示しています。



警告



禁止

- ・タイル面やぬれた床など、すべりやすい所では使用しない。

転倒したり、すべって大けがをする可能性があります。
また本製品内部に水が浸入し、故障の原因になります。

- ・本製品の端に乗ったり、飛び乗ったり、飛び跳ねたり、投げたりしない。

転倒したり、すべって大けがをする可能性があります。また強化ガラスを使用していますが、ガラスが破損しけがをする可能性があります。



水ぬれ禁止

- ・ぬれた体で乗らない。

転倒したり、すべって大けがをする可能性があります。

- ・水につけたり、水をかけたりしない。

本製品内部に水が浸入し、故障の原因になります。



必ず守る

- ・測定結果は決して自己判断しないでください。

必ず医師または専門家の指導を受けてください。

注意



分解禁止

- ・ 分解や修理、改造は絶対にしないでください。



水ぬれ禁止

- ・ 本体に水などの液体をかけないでください。

- ・ 電池を火中に入れたり、加熱したり、水没させたりしないでください。

- ・ 新しい電池と使用済みの電池、種類の違う電池を同時に使用しないでください。

- ・ 業務用(病院や健康診断など)では絶対に使用しないでください。



禁止

- ・ 品物の取引または証明には使用しないでください。

- ・ 体を安定させることが難しい方は、介護者の援助を受けるか手すりなどをご利用ください。

※体に何かが触れている状態での測定結果は参考値としてください。

- ・ 本製品の間隙などに指や異物を入れないでください。

- ・ 本製品を乳幼児に触らせないでください。



必ず守る

- ・ 電池は極性⊕⊖を正しくセットしてください。

- ・ 電池を廃棄する際は、お住まいの地方自治体の指示に従ってください。

製品についてのお願い

- 本製品は家庭用です。業務用や品物の売買取引、その他の目方を証明する場合などには使用できません。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 直射日光が当たる場所や、極端な高温の場所では使用しないでください。
また電子レンジなど、電磁波を発生する機器の近くでも使用しないでください。
- 温度差の大きい場所を移動させた場合は、2時間以上その環境に放置したあとにご使用ください。

保管上のご注意

- 次のような場所で保管しないでください。
湿気の多い場所/直射日光が当たる場所/極端に高温な場所
- 次のような状態で保管しないでください。
物を載せた状態/裏返しの状態/電池を入れたまま箱に収納した状態
- 長期間(40日以上)使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。

測定のためのチェックポイント

- 正しい測定を行うために次の項目をチェックしてください。

設置場所

平らで硬い床面に設置してください。畳や絨毯などの柔らかい床面では使用しないでください。また脚部にゴミなどの異物が付着していないことを確認してください。

着衣

素足で、なるべく裸に近い状態が望ましいです。

姿勢

直立した状態で静かに本体に乗り、測定してください。座ったり、何かに触れたまま測定しないでください。また測定中はできる限り動かないでください。

測定時間

毎日同じ時間に測定することをお勧めします。

こんなときにご注意ください

電池交換をしたとき、本製品を持ち上げたり場所の移動をしたあとにご使用になると測定値に誤差が生じる場合があります。


この場合は以下の操作を行なってください。

- 平らで硬い床面に本製品を置いてください。
- 本製品の中央を足で踏み、表示が出たら足を離します。表示が「0.0kg」になります。


以上の操作を行ってから測定をしてください。

各部名称

● 表面

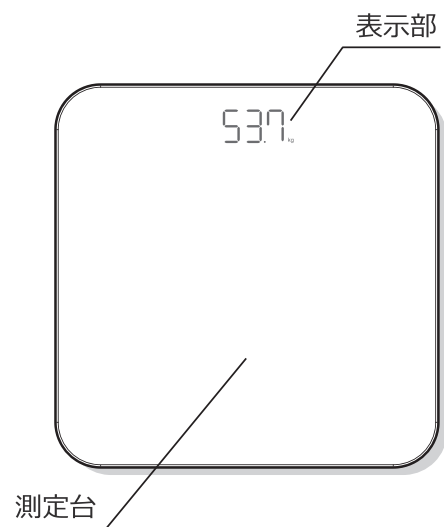

● 裏面

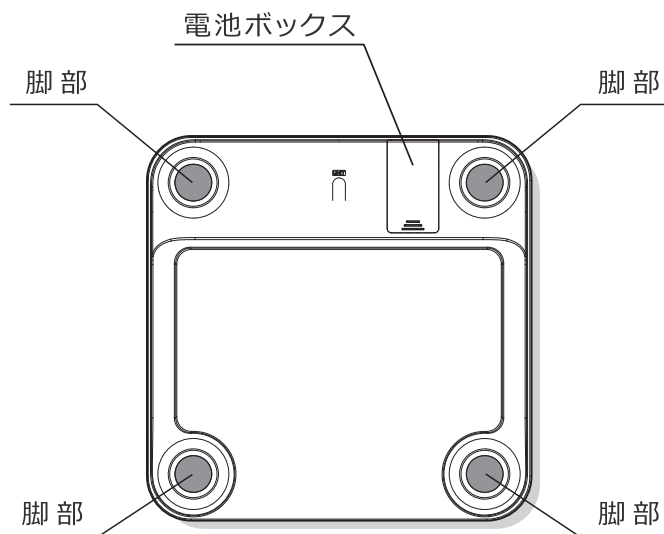

ご使用になる前に

● 電池の入れ方


使用電池：単4形乾電池 × 2本（別売）

※本製品に電池は付属しておりません。新品で同一銘柄の電池を用意してください。
また初めてご使用になる際は単4形乾電池をセットして正常に動作することを確認してください。

- ① 電池蓋を矢印の方向に押しながら、スライドして外してください。



- ② 下図のとおり電池をセットしてください。
このとき電池の極性 $\oplus$ $\ominus$ を正しく入れてください。

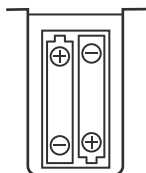

- ③ ①と逆の手順で電池蓋をセットしてください。

● 電池の交換

電池が消耗すると「 $\text{L}\square$ 」が点灯します。
上記の手順で新しい電池と交換してください。

⚠ 警告 電池の取扱いについて

- 万一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の診察・治療を受けてください。
- 万一、電池の液が皮膚や衣服についたときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。
- 電池の極性 $\oplus$ $\ominus$ を正しく入れてください。液漏れ、破裂、発熱などが発生し、ケガや故障の原因になります。
- 必ず指定の電池を使用し、新しい電池と使用済みの電池、種類の違う電池を同時に使用しないでください。また、長期間（40日以上）使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。液もれ、破裂などが発生し、ケガの原因になります。
- 電池交換の際は、2本全てを新品の同一銘柄の電池と交換してください。
- 充電式電池は使用しないでください。
- 電池を火中に入れたり、加熱や充電したり、水没させたりしないでください。液もれや破裂の原因になります。
- 電池を廃棄する際は、お住まいの地方自治体の指示に従ってください。

測定方法

- ①本製品を平らで硬い床面に設置し、本体の上に静かに乗ってください。
※乗ると自動で電源が入ります。動いたり、体が何かに触れないようにしてください。
- ②体重が確定すると結果が3回点滅し、その後、約15秒ほど表示されます。
- ③結果の表示後は自動的に電源が切れます。
※測定値が最大計量をこえる場合は「E」を表示します。
※ステップオン荷重は5kg以上です。5kg未満の荷重では電源が入りません。
※「E」表示が出た場合は、体重計が安定していない状態で測定した可能性があります。体重計を安定した状態にしてから、再度測定を行ってください。

製品仕様

製 品 名	デジタル体重計
型番／品番／色	HBK-T108-W／08-1249／ホワイト
計 量 範 囲	5～150kg
目 量	100g (5kg から 100kg まで) 200g (100kg をこえて 150kg まで)
ステップオン荷重	5kg 以上
表 示 部	LED 表示
電 源	DC3.0V 単4形乾電池2本(別売)
電 池 寿 命	約6ヶ月(新品アルカリ乾電池使用、1日2回測定の場合)
外 形 寸 法	(約) 幅 260× 高さ 23× 奥行 260mm
質 量	約975g(電池含まず)
付 属 品	保証書付取扱説明書

※パッケージおよび取扱説明書に記載されているイラストはイメージです。
実際の製品と異なる場合があります。

※商品改良のため、仕様及び外観は予告なしに変更することがあります。



計量精度

本製品は計量法に定められた技術基準で製造し、厳正な検査の上、出荷しております。
なお製品の計量精度は次のとおりです。

周囲温度 $23.5\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $50\pm 20\%$

計量範囲	精度保証範囲
5kg から 75kgまで	$\pm 200\text{g}$
75kg をこえて100kgまで	$\pm 300\text{g}$
100kg をこえて150kgまで	$\pm 600\text{g}$

※本製品はご家庭で使用されるためにつくられたものです。品物の売買取引や、公にその物の目方を証明する場合はご使用になれませんのでご注意ください。

お手入れ方法

やわらかいふきんを水にぬらし、よく絞ってから拭いてください。

※ベンジンやシンナー、磨き粉、たわし、スポンジのナイロン面は使用しないでください。

※ 40°C 以上のお湯は使用しないでください。

故障かな？と思ったら

「故障かな？」と思ったら、修理をご依頼される前に次のことをご確認ください。

[症 状]

[対 処]

測定台の上に一度乗っても、表示部に何も表示されない

- 電池はセットされていますか？電池をセットしてください(P.5)
- 電池が消耗していませんか？新しい電池と交換してください(P.5)
- 電池の極性(+)(-)を正しくセットしていますか？電池の極性(+)(-)を正しくセットしてください(P.5)
- 荷重は 5kg 以上ですか？ステップオン荷重は 5kg 以上です。5kg 未満の荷重では電源が入りません。

測定結果が正しくない

- 動いたり、体が何かに接触していませんか？(P.3)

L0と表示される

- 電池が消耗しています。新しい電池に交換してください(P.5)

Errorと表示される

- 最大計量(ひょう量)150kgを超えています(この場合測定できません)

[と表示される

- 体重計が安定していない状態で測定した可能性があります。体重計を安定した状態にしてから、再度測定を行なってください。

持込修理 無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書き換えられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入事項の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ

[illegible]

[illegible]

保証書

製品名		デジタル体重計
型番／品番／色		HBK-T108-W／08-1249／ホワイト
★お買い上げ日		年 月 日
保証期間		お買い上げ日より1年
お客様	★お名前	様
	★ご住所 〒	
	★お電話番号 ()	
販売店	★住所 店名 電話	
	印	

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行してる者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

輸入事業者：

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

切り取り線